



### Gipslösemittel

Säurefreies, materialschonendes Lösungsmittel zum Entfernen von Gipsresten auf Kunststoffen, Prothesen, Abdrucklöffeln, Instrumenten usw.

Hinrichs Gipslösemittel ist eine gebrauchsfertige Lösung, die unverdünnt angewendet wird. Für alle Ultraschallgeräte geeignet.

Anwendung mit Ultraschall:	mind. 20 Minuten
Anwendung ohne Ultraschall:	ca. 20 - 60 Minuten

Nach der Reinigung im Gipslösebad sollten die Instrumente und Hilfsmittel unter fließendem Wasser abgespült werden. Bei hartnäckigen Abdruckmassen wird der Gebrauch von Bürsten empfohlen.

Lieferbar in: 1 Liter und 5 Liter

MR 01/06